



INGENASA

INgezim CIRCOVIRUS IgG/IgM R.11.PCV.K2

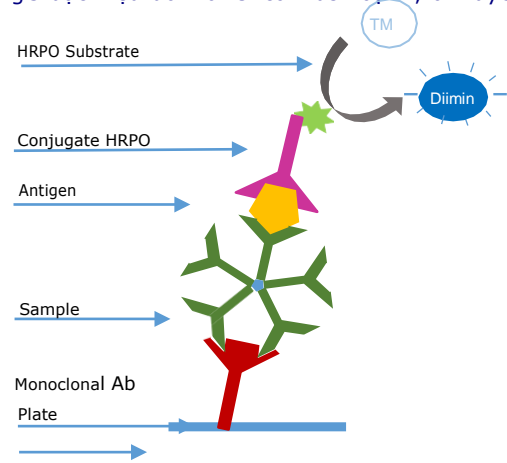

INgezim CIRCOVIRUS IgG / IgM là một xét nghiệm miễn dịch bắt giữ dựa trên việc sử dụng 3 kháng thể đơn dòng (một kháng thể đặc hiệu cho Circovirus lợn, một kháng thể đặc hiệu cho porcine IgM và một kháng thể khác đặc hiệu cho porcine IgG) và một kháng nguyên tái tổ hợp. Ingezim PCV cho phép phát hiện đồng thời IgM và IgG đặc hiệu đối với Circovirus Loại 2, ở huyết thanh lợn.

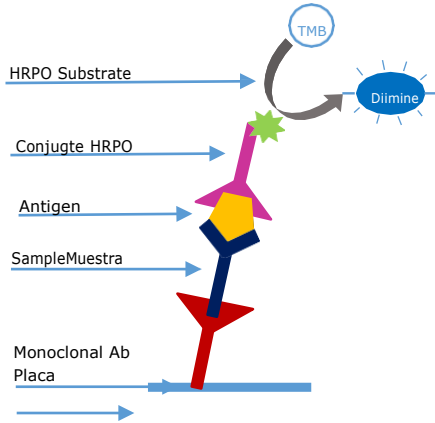

CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

- Hai loại đĩa được cung cấp: một loại được phủ MAB đặc trưng cho IgM của lợn và một loại khác được phủ MAB cho IgG của lợn. Mẫu được thêm vào và ủ. Nếu các mẫu chứa IgM hoặc IgG, chúng sẽ liên kết với các kháng thể tương ứng trên đĩa.
- Để xác định xem Igs có phải là PCV đặc hiệu hay không, một protein VP2 tái tổ hợp được thêm vào và được ủ.
- Sau khi bổ sung MAB đặc hiệu PCV VP2, nó sẽ liên kết với kháng nguyên trong trường hợp protein VP2 tái tổ hợp được bắt giữ bởi các Igs cụ thể (mẫu dương tính).
- Phản ứng được phát hiện sau khi bổ sung cơ chất.

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ




ỨNG DỤNG

- Chẩn đoán giúp phân biệt với các bệnh lý khác của lợn** do bệnh không có triệu chứng đặc hiệu.
- Việc phát hiện kết hợp các kháng thể đặc hiệu IgM và IgG đối với Circovirus** cho phép phát hiện nhiễm trùng sớm, nhiễm trùng mạn hoặc động vật chưa bao giờ tiếp xúc với vi-rút.
- Sự phát triển của cả hai hiệu chuẩn** là một công cụ rất hữu ích để thu thập dữ liệu thống kê về các đàn và mối tương quan chúng với các thông số năng suất của trang trại.

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Segalés và cộng sự. Hội nghị quốc tế về vi rút vi rút ở động vật và các bệnh liên quan. Belfast, Vương quốc Anh (2005)
Vela và cộng sự. Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 5 về các bệnh ở lợn mới nổi và tái xuất hiện Krakow, Ba Lan (2007)
Keller và cộng sự. Đại hội IPVS lần thứ 21, Vancouver, Canada (2010)

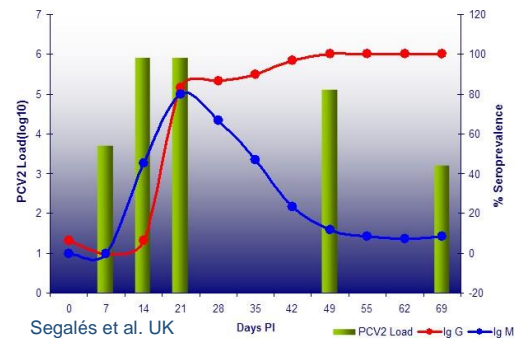

THÀNH PHẦN CỦA BỘ DỤNG CỤ

- Đĩa 96 giếng chứa IgM
- Đĩa 96 giếng chứa IgG
- Lọ đối chứng Dương IgM
- Lọ đối chứng Dương IgG
- Lọ đối chứng Âm
- Lọ Conjugate
- Chai dung dịch rửa
- Chai dung dịch pha loãng
- Chai cơ chất
- Chai dung dịch ngưng phản ứng.



SẢN PHẨM DO INGENASA SẢN XUẤT SỐ
ĐĂNG KÝ: 0805 RD



HẠN SỬ
DỤNG:

12 tháng
Lưu trữ 2°C-8°C